

Anleitung zur Speichelprobe-Abgabe für die Untersuchung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

1. Speichelabgabe

1 Stunde vor der Speichelabgabe **NICHTS** essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.

3 × hintereinander Spucken:
Dazu zuerst intensiv Räuspern, dann Speichel im Mund sammeln und in das Proberöhrchen spucken. Vorgang wiederholen.



Proberöhrchen mit rotem Deckel
Artikelnummer Materialplakat 040



Virustransport-
medium

2. Zugabe Virustransportmedium

Giessen Sie das Virustransportmedium in das Proberöhrchen. Das leere Virustransportmedium Röhrchen können Sie im Hausmüll entsorgen. Schrauben Sie das Proberöhrchen fest zu. Das ist wichtig damit keine Flüssigkeit ausfliessen kann.

3. Vermischen von Speichel und Virustransportmedium

Neigen Sie das Proberöhrchen 2–3-mal damit sich das Virustransportmedium mit dem Speichel vermischt.



2-3 x schwenken

4. Verpacken und Versand

Speichelprobe zusammen mit dem ausgefüllten Coronavirus-Auftragsformular verpacken und unverzüglich an die Laborgemeinschaft 1 schicken. Probe bis zum Versand im Kühlschrank aufbewahren.